

# جهاز الاختبار السريع لفيروس كورونا (كوفيد-19)

## أدوات الاختبار السريع لفيروس كورونا

أنبوبة الاختبار + غطاء الأنبوبة

جهاز الاختبار  
حامل الأنابيب  
المسحة الأنفية  
ساعة للتوقيت  
المحلول المنظم  
كيس بلاستيكي قابل للغلق

## كيفية استخدام الجهاز؟

1 الخطوة تجهيز أنبوبة الاختبار ووضع المحلول المنظم داخل الأنبوبة لحد العلامة الموضحة.

2 الخطوة أخذ مسحة أنفية والتأكد من تحريكها بشكل دائري 5 مرات في الجهتين.

3 الخطوة وضع المسحة الأنفية داخل أنبوب الاختبار وتحريكها بشكل دائري 5 مرات، وسحب المسحة الأنفية إلى الأعلى والضغط على أنبوبة الاختبار مع كسر الجزء العلوي من المسحة، ثم غلق أنبوبة الاختبار من الأعلى.

4 الخطوة فتح أنبوبة الاختبار من الأسفل ووضع 5 قطرات في المكان المحدد بجهاز الاختبار.

5 الخطوة الانتظار لمدة 15 دقيقة. في حال ظهور خط واحد باللون الأحمر في المنطقة C تكون النتيجة سلبية، وفي حال ظهور خطين باللون الأحمر في المنطقتين C / T تكون النتيجة إيجابية، حينها يتوجب عمل فحص PCR، وعند عدم ظهور أي خط في المنطقة C يعتبر الاختبار غير صالح ويجب إعادته.

6 الخطوة بعد الانتهاء يجب التخلص من الأدوات المستخدمة في كيس بلاستيكي وحفظها في الخارج لمدة 3 أيام. بعد 3 أيام يمكن معالجتها كفايات عادية.



امسح "الباركود"  
لمشاهدة شرح عن  
طريقة الاستخدام

## معلومات حول الجهاز

جهاز الاختبار السريع لفيروس كورونا (كوفيد-19)، هو فحص سريع وفعال يستخدم عبر أخذ عينات من مسحات أنفية للأفراد تمكن من تشخيص حالة المريض بدقة خلال 15 دقيقة.

## ملاحظات هامة

- بغض النظر عن نتائج جهاز الفحص السريع، إذا شعرت بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا (الحمى، كحة، ضيق في التنفس، صداع، آلام في الجسم)، يرجى الاتصال على الرقم (444) على الفور من أجل الترتيب لإجراء اختبار المسحة الأنفية (PCR).
- إن نتيجة جهاز الفحص السريع أولية ولا تستبعد احتمالية الإصابة بالفيروس.
- إن جهاز الفحص السريع ليس بديلًا عن فحص (PCR)؛ والنتيجة الإيجابية للفحص السريع لا يمكن اعتبارها تشخيص على حالة قائمة لفيروس كورونا.

## الإبلاغ عن النتائج

عند إظهار الفحص السريع لنتيجة إيجابية، يرجى القيام بالتالي:

- 1 قم بعزل نفسك والبس الكمام
- 2 قم فوراً بالإبلاغ عن النتيجة الإيجابية عبر الاتصال بالرقم (444) لحجز موعد لإجراء فحص (PCR)
- 3 لا تحتاج إلى الإبلاغ عن النتائج السلبية.

## المخالطون

إن جهاز الفحص السريع غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يُعرف بأنهم خالطوا حالة قائمة لفيروس كورونا خلال عشرة أيام سابقة من إجراء الفحص السريع.

## المخالطون هم:

- الذين يعيشون في نفس المنزل الذي تعيش فيه حالة قائمة لفيروس كورونا
  - من كانوا على بعد مترين من حالة قائمة بشكل مؤكد لأكثر من عشر دقائق دون ارتداء قناع واق
  - من يتشاركون نفس الأدوات ويقضون فترات طويلة في مكان مغلق مع حالة قائمة لفيروس كورونا
- إذا كانت تنطبق عليك مواصفات المخالطين، قم بعزل نفسك على الفور واتصل بالرقم (444).

